

# NEUR@TAB

## Instrukcja użytkownika



**AssisTech**<sup>®</sup>  
Assistive Technology Systems



neuro**TAB**

Instrukcja użytkownika



© **AssisTech Sp. z o.o. 2024**

Wersja instrukcji: 1.0

Data wydania: 05.11.2024 r.

**AssisTech Sp. z o.o.**

ul. Kampinoska 10, 80-180 Gdańsk

tel. 537 446 406

e-mail: [kontakt@assistech.eu](mailto:kontakt@assistech.eu)

[www.assistech.eu](http://www.assistech.eu)

## Spis treści

1. Zawartość opakowania .....	5
2. Włączanie i wyłączanie urządzenia, ładowanie.....	6
3. Moduły i przyciski.....	6
4. Personalizacja .....	7
5. Panel pomoc.....	9
6. Wyniki.....	10
7. Menu dolne – objaśnienie przycisków.....	12
8. Klawiatury .....	15
9. Tablice komunikacyjne – dodawanie, edycja przycisków i tablic .....	16
10. Warunki użytkowania produktu.....	19





## 1. Zawartość opakowania

W opakowaniu powinny znajdować się elementy wymienione poniżej:

- A. tablet z etui
- B. podstawa
- C. zasilacz / przewód zasilający
- D. instrukcja użytkownika
- E. pasek





## 2. Włączanie i wyłączenie urządzenia, ładowanie



- 1 - Przycisk włączający urządzenie
- 2 - Przycisk zmiany głośności
- 3 - porty typu USB-C (2 szt.)
- 4 - Gniazdo ładowania

Urządzenie włącza się przyciskiem **(1)** znajdującym się na górnej krawędzi obudowy. Aby zakończyć pracę, należy w Hamburger menu wybrać przycisk Zamknij lub nacisnąć przycisk **(1)** na urządzeniu.

Aby naładować urządzenie należy umieścić końcówkę przewodu zasilającego w gnieździe ładowania **(4)**, drugi koniec należy podłączyć do gniazdka elektrycznego.


**Do ładowania baterii można używać tylko oryginalnej ładowarki dołączonej do zestawu!**

## 3. Moduły i przyciski

### Główne moduły aplikacji neuroTAB:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. Ocena stanu<ul style="list-style-type: none"><li>a. Skala depresji Becka</li><li>b. Test jakości życia WHOQOL</li><li>c. Ból i inne problemy</li></ul></li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>4. Terapia<ul style="list-style-type: none"><li>a. Zadania podstawowe</li><li>b. Rozumienie</li><li>c. Myślenie i wyobrażenia</li><li>d. Słowa</li><li>e. Liczby</li></ul></li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>2. Koordynacja wzrokowo-ruchowa</li><li>3. Komunikacja<ul style="list-style-type: none"><li>a. Klawiatury</li><li>b. Tablice kontekstowe</li><li>c. Książka komunikacyjna</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>5. Odtwarzacz muzyki</li></ul>   |



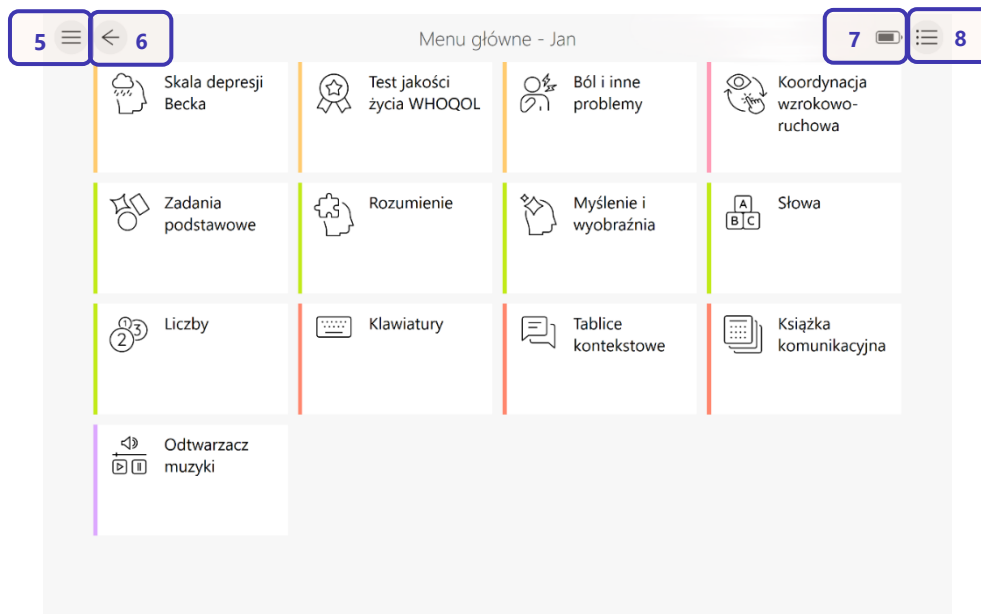

## Opis przycisków


**5** - Przycisk **Hamburger menu** umożliwia zmianę głośności, zmianę ustawień, przejście do wyników, zamknięcie systemu; z poziomu listy pacjentów: wyświetlenie instrukcji obsługi i licencji.

**6** - **Wstecz** umożliwia przechodzenie do poprzednich ekranów aplikacji.

**7** - Wizualizacja poziomu naładowania baterii.

**8** - Zmiana sposobu wyświetlania treści menu - kafelki / lista.


## 4. Personalizacja

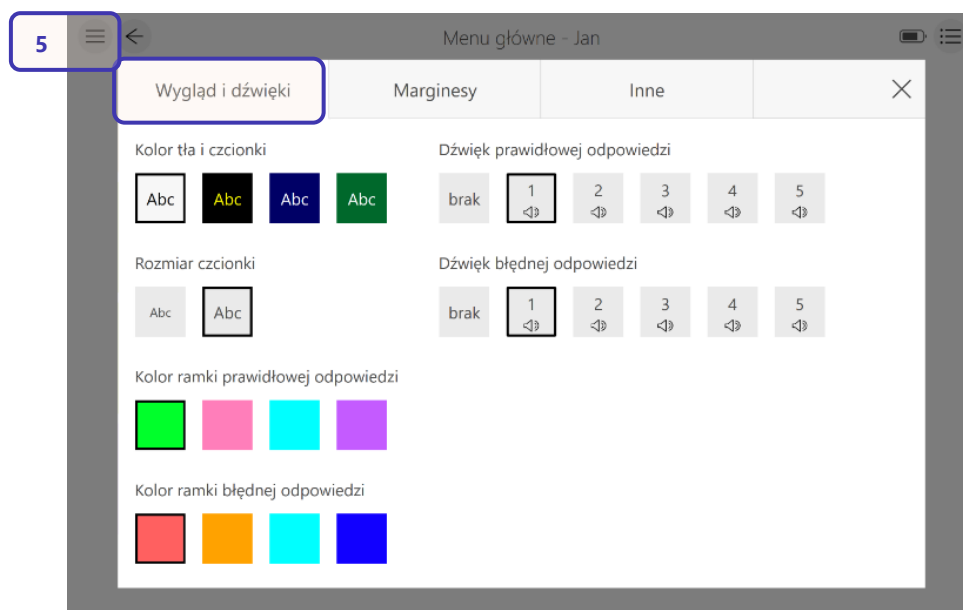



Okno personalizacji można wywołać klikając **Personalizacja** w **Hamburger menu (5)**.


W zakładce **Wygląd i dźwięki** można wybrać motyw kolorystyczny aplikacji, rozmiar czcionki, kolor ramki oraz dźwięk poprawnej i błędnej odpowiedzi.

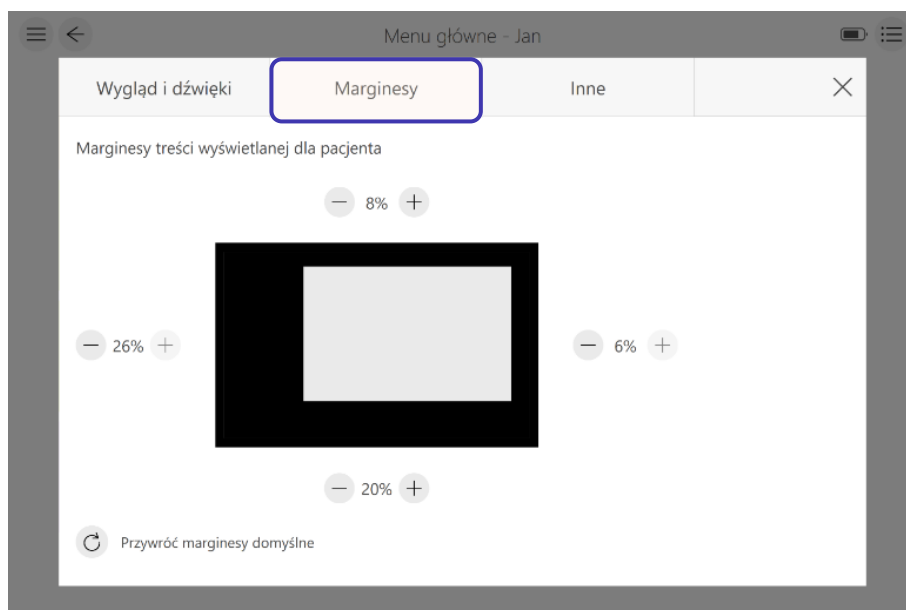

W zakładce **Marginesy** można ograniczyć obszar wyświetlania treści dla pacjenta do wybranego fragmentu ekranu (maksymalnie o 32% pionowo i poziomo).


W zakładce **Inne** można ustawić widoczność panelu pomoc i dodatkowych podpisów w zadaniach oraz określić położenie podpisów względem obrazka. Można zmienić ustawienia automatycznego przechodzenia do kolejnej planszy, a także wybrać głos syntezatora (żeński lub męski) oraz ustawić jego szybkość.

Opcja **Dodatkowe podpisy** powoduje np. zamianę polecenia głosowego (głośnik) na polecenie głosowo-tekstowe.

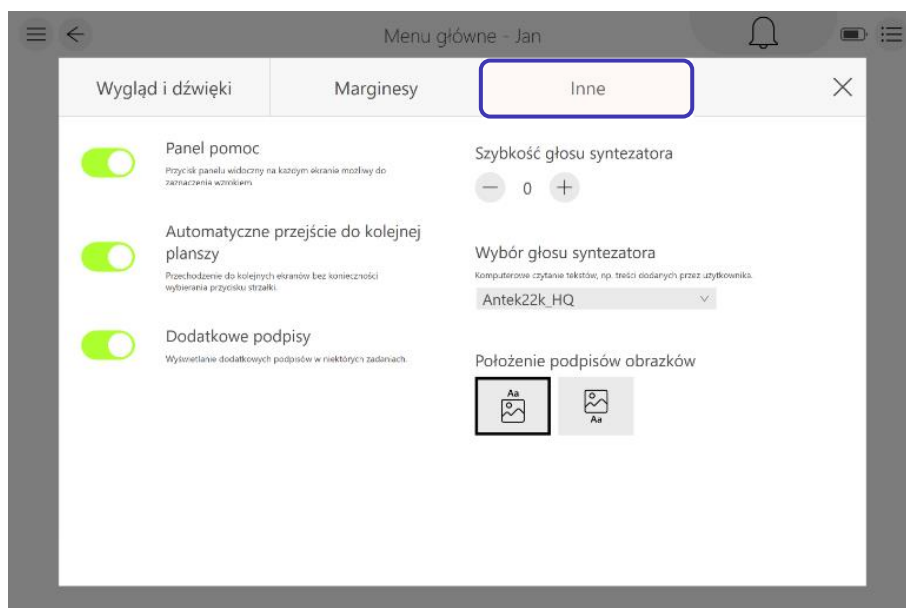





## 5. Panel pomoc

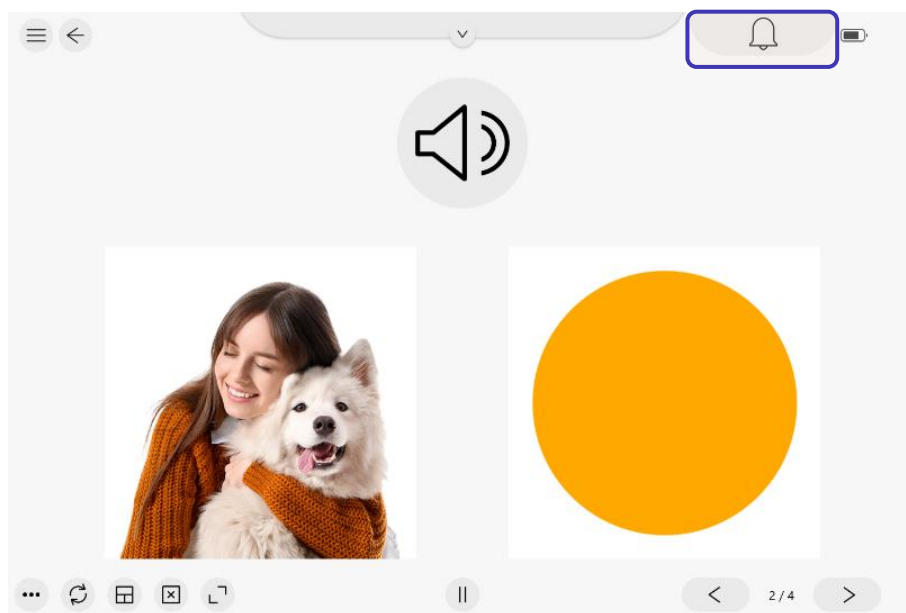

Widoczność **panelu pomoc** można włączyć lub wyłączyć w zakładce **Inne (Personalizacja w Hamburger menu)**.

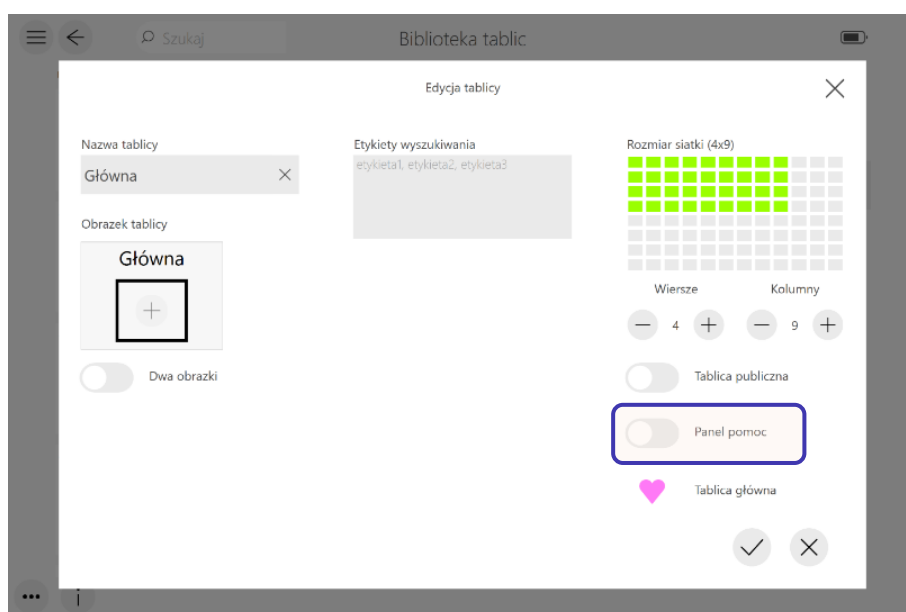

Po włączeniu, **Panel pomoc** można wywołać prawie na wszystkich ekranach aplikacji, poprzez kliknięcie przycisku z ikoną dzwonka (prawy górny róg ekranu).

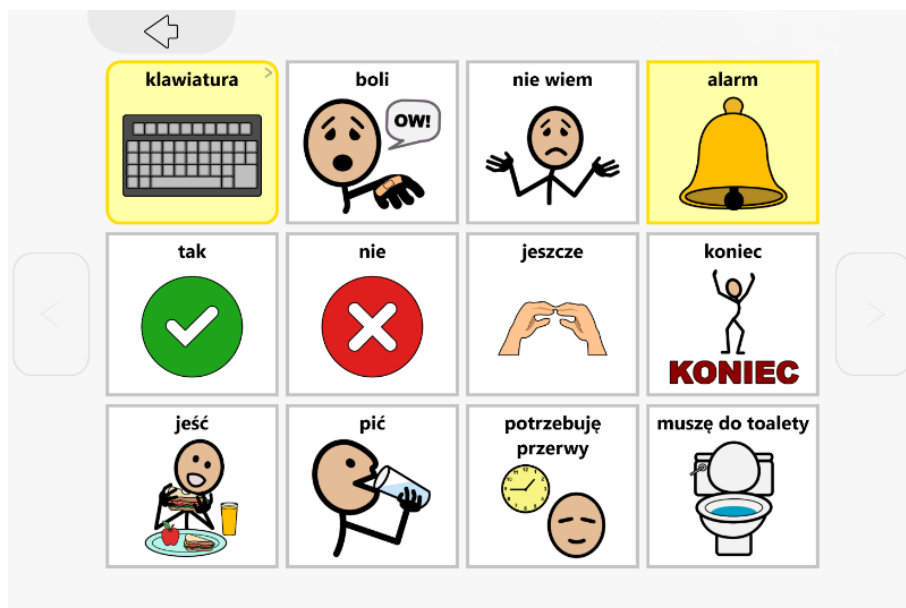

Pod przycisk można podpiąć dowolną tablicę utworzoną w module **Książka komunikacyjna** lub w module **Tablice kontekstowe**. Wystarczy w ustawieniach wybranej tablicy włączyć suwak Panel pomoc.

## 6. Wyniki

5

Menu główne - Jan

Ocena stanu    Koordynacja wzrokowo-ruchowa    Terapia    **Komunikacja**

Zadania podstawowe     Rozumienie     Myślenie i wyobraźnia     Słowa     Liczby


od 21.06.2024 do 24.06.2024

	21.06.2024	24.06.2024	Podsumowanie sekcji
<b>1. Dzielenie na pół</b>			
Poziom 1.	57%	75%	66%
Poziom 2.	38%	31%	35%
Poziom 3.	44%	50%	47%
Poziom 4.	24%	29%	27%
<b>2. Rozpoznawanie obiektów</b>			
Poziom 1.	80%	70%	75%
Poziom 2.	47%	57%	52%
Poziom 3.	55%	67%	61%
Poziom 4.	37%	47%	42%
<b>3. Percepcja rozmiarów</b>			
Poziom 1.	88%	75%	82%
Poziom 2.	63%	63%	63%
Poziom 3.	60%	62%	61%
<b>4. Percepcja kolorów</b>			

Podgląd wyników użytkownika można wywołać klikając **Wyniki** w **Hamburger menu (5)**.



Wyniki wykonanych przez użytkownika aktywności można wyświetlać w postaci tabel lub wykresów. Zmiana widoku możliwa jest po wybraniu ikonki znajdującej się w prawym górnym rogu okna, obok ikonki eksportu.

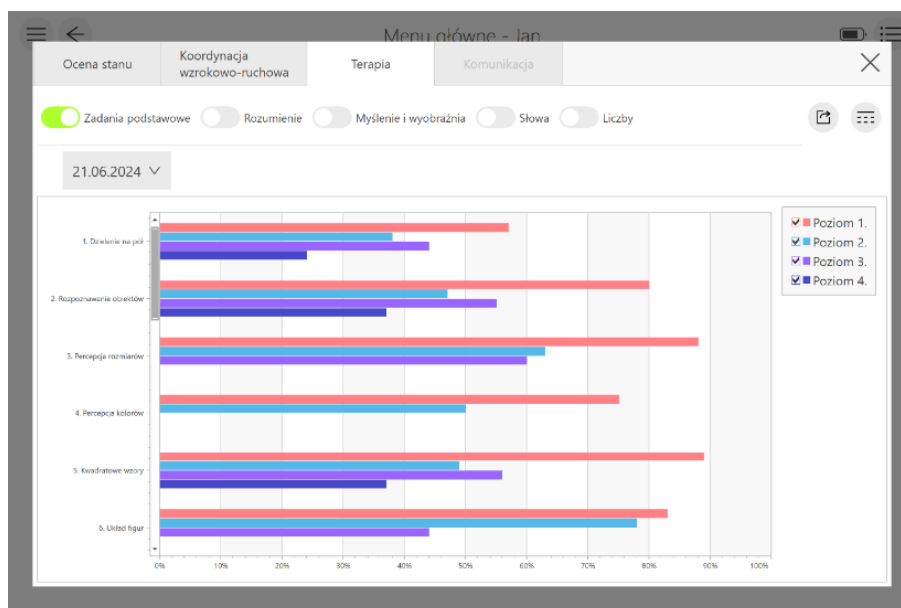

Eksport wyników w postaci tabel możliwy jest po wybraniu ikonki eksportu (prawy górny róg okna). Następnie należy wybrać zakres sekcji i wybrać przycisk **Eksportuj**.

Przed wykonaniem eksportu, do urządzenia należy podłączyć nośnik danych (pendrive).

**Eksport wyników - Terapia**

Zakres eksportu:

- Zadania podstawowe
- Rozumienie
- Myślenie i wyobraźnia
- Słowa
- Liczby

Format pliku:  PDF

Postać danych:  tabela


Plik z danymi zostanie zapisany na zewnętrznym nośniku danych, podłączonym do portu USB.

Zakres czasowy:

cały zakres    wybrany zakres    Eksportuj



## 7. Menu dolne – objaśnienie przycisków

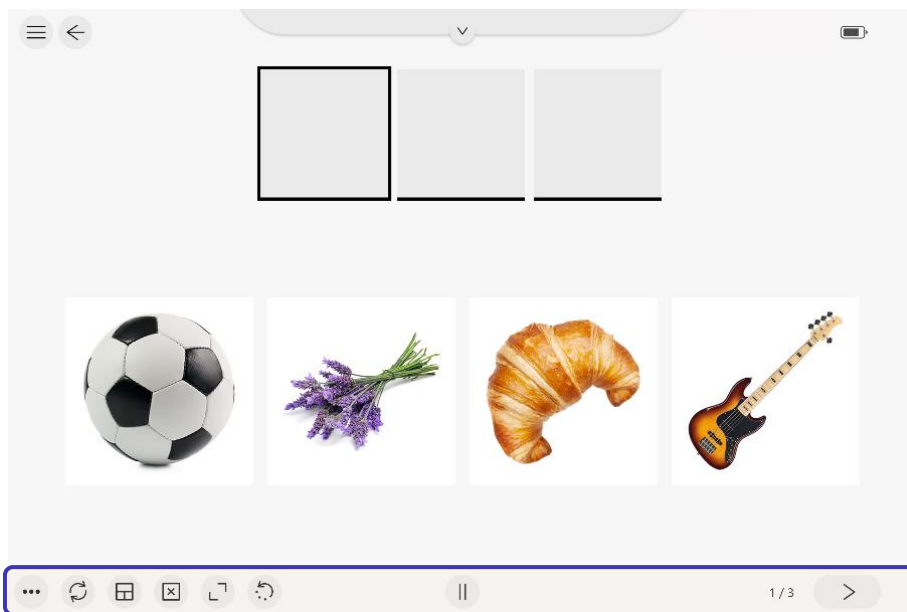

W lewym, dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk opcji **menu dolnego** (trzy kropki), umożliwiający rozwijanie i zwiżanie opcji menu. Przycisk dostępny jest po włączeniu aktywności dla użytkownika – zadań, testów, klawiatur itp.

W zależności od prezentowanego materiału w menu dolnym wyświetlane są różne opcje, pozwalające dostosować wyświetlane treści do potrzeb użytkownika.











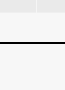


Poniżej zostały przedstawione opcje menu dolnego występujące w **Ocenie stanu, Koordynacji wzrokowo-ruchowej, Terapii i Klawiaturach**.




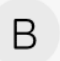


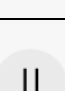






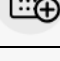

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



W zależności od prezentowanego materiału w menu dolnym wyświetlane są różne opcje, pozwalające dostosować wyświetlane treści do potrzeb użytkownika.

Poniżej zostały przedstawione opcje menu dolnego występujące w **Tablicach kontekstowych** oraz w **Książce komunikacyjnej**.

9.		– przycisk opcji umożliwiający ukrywanie i odkrywanie menu dolnego
10.		– mieszanie odpowiedzi
11.		– zmiana układu wyświetlania treści: układ poziomy, pionowy prawy, pionowy lewy
12.		– ustawienia ramki przycisków: brak ramki, standardowa ramka, gruba ramka
13.		– full screen
14.		– przypomnienie wzoru np. w zadaniach z treściami do zapamiętania
15.		– pauza
16.		– włączanie i wyłączanie dźwięku w zadaniach w <b>Koordinacji wzrokowo-ruchowej</b>
17.		– timer odliczający czas do zmiany planszy na kolejną; kliknięcie timera powoduje natychmiastowe przejście dalej
18.		– pasek postępu wskazuje, ile odpowiedzi należy udzielić, żeby rozwiązać przykład
19.		– przejście do kolejnej planszy
20.		– przejście do poprzedniej planszy
21.		– koniec / wyjście z zadania



22.		– przycisk zmiany <b>Klawiatur</b> : klawiatura QWERTY (komputerowa), klawiatura alfabetyczna, klawiatura modułowa
23.		– przycisk pogrubiania liter dostępny w sekcji <b>Klawiatury</b>
24.		– przycisk opcji umożliwiający ukrywanie i odkrywanie menu dolnego
25.		– przejście do okna z informacją o komunikacji AAC
26.		– tryb edycji przycisków i zmiany miejsca (przesuwania) przycisków na danej planszy
27.		– ogólne ustawienia tablicy / planszy: nazwa, obrazek, rozmiar siatki, dostępność tablicy
28.		– usuwanie bieżącej / wyświetlanej planszy <b>Tablicy komunikacyjnej</b>
29.		– poziom widoczności przycisku w <b>Książce komunikacyjnej</b> (3 poziomy widoczności)
30.		– ustawienia ramki przycisków: brak ramki, standardowa ramka, gruba ramka
31.		– włączanie / wyłączenie widoczności paska podpowiedzi w <b>Książce komunikacyjnej</b>
32.		– <b>biblioteka tablic</b> komunikacyjnych
33.		– full screen
34.		– dodawanie nowej tablicy komunikacyjnej
35.		– dodawanie nowego folderu
36.		– <b>import</b> umożliwiający importowanie tablic komunikacyjnych z zewnętrznego nośnika






## 8. Klawiatury



W sekcji **Klawiatury** dostępne są przyciski o następujących funkcjach:

- **Historia klawiatur (37)** – zawiera teksty zapisane przez użytkownika.
- **Zapisz (38)** – pozwala zapisać tekst wpisany w polu tekstowym w historii klawiatur.
- **Usuń znak (39)** – pozwala usunąć ostatni wpisany znak.
- **Usuń cały tekst (40)** – usuwa wszystkie znaki wpisane w polu tekstowym.
- **Shift (41)** – zmienia wielkość liter klawiatury (małe / wielkie litery).
- **!123 (42)** – przejście do klawiatury ze znakami specjalnymi (np. ą, ż, ?) i cyframi.
- **Przeczytaj (43)** – odczytanie całego wpisanego tekstu przez syntezytor.

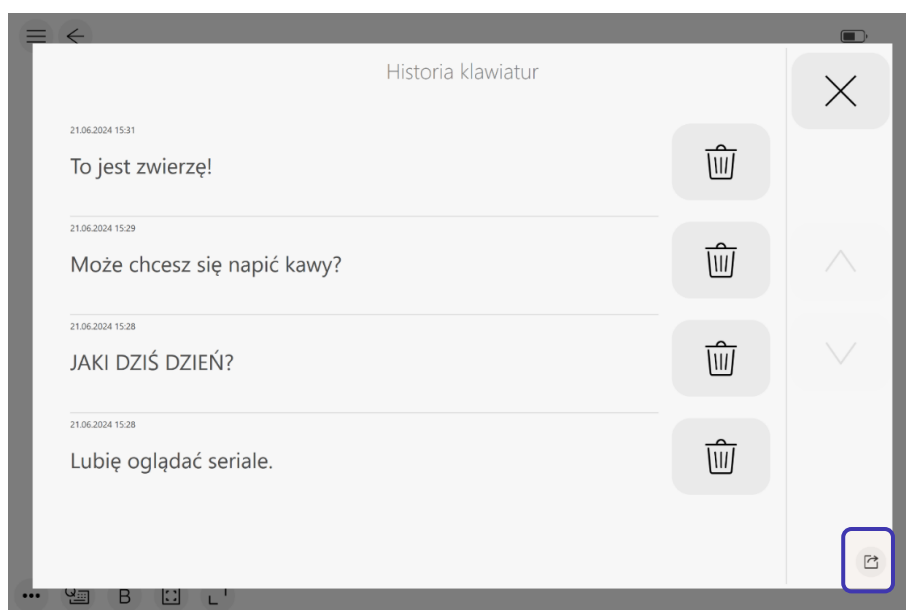




W menu dolnym (trzy kropki) możliwe jest dostosowanie ustawień do potrzeb użytkownika (pogrubienie liter, ramka przycisków), a także wybranie preferowanej klawiatury z trzech dostępnych:

- **Klawiatura komputerowa (QWERTY)** – o układzie klawiszy jak w klawiaturach komputerowych.
- **Klawiatura alfabetyczna** – o alfabetycznym układzie liter.
- **Klawiatura modułowa** – wszystkie znaki zostały pogrupowane w moduły liter / znaków po to, by zwiększyć wielkość pojedynczego klawisza.

Po wybraniu przycisku **Historia klawiatur (37)** możliwe jest wyświetlenie zapisanych wpisów, ich usunięcie oraz wyeksportowanie na zewnętrzny nośnik (ikona eksportu w prawym dolnym rogu).

## 9. Tablice komunikacyjne – dodawanie, edycja przycisków i tablic

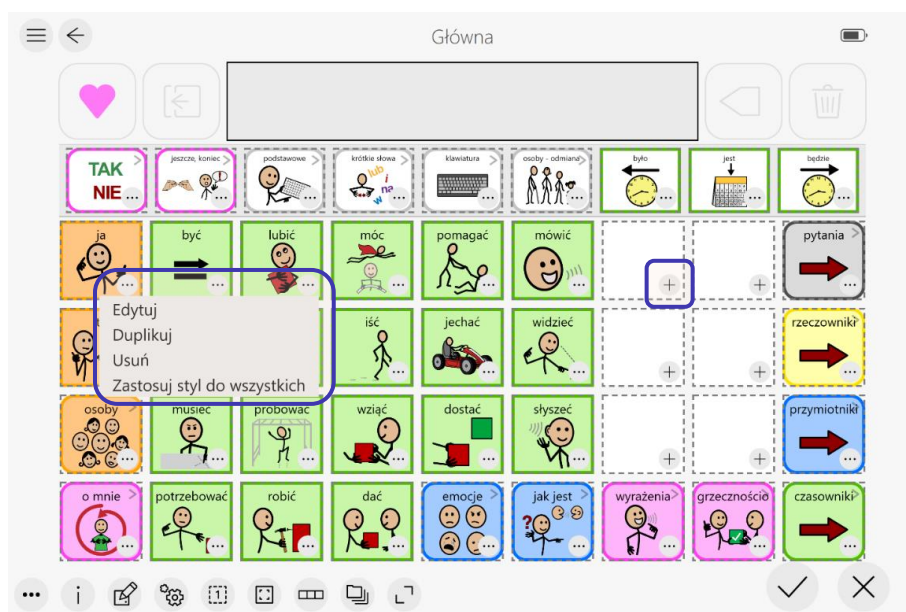


W sekcjach **Tablice kontekstowe** i **Książka komunikacyjna** możliwe jest dodawanie i edytowanie przycisków na planszach komunikacyjnych po włączeniu w menu dolnym trybu edycji (26).

Po włączeniu trybu edycji, nowy przycisk można dodać klikając + w prawym dolnym rogu pustej komórki. Na istniejących przyciskach w analogicznym miejscu znajduje się ikona opcji przycisku (trzy kropki).



### Opcje przycisku (lista rozwijana):

- **Edytuj** – otwiera okno edycji przycisku z zakładkami: Wygląd przycisku, Tekst i akcja, Fleksja (zakładka Fleksja dostępna tylko w Książce komunikacyjnej).
- **Duplikuj** – pozwala duplikować wybrany przycisk na najbliższe wolne miejsce na tablicy.
- **Usuń** – pozwala usunąć przycisk.
- **Zastosuj styl do wszystkich** – pozwala ustawić ten sam kolor ramki i tła wszystkim przyciskom na tablicy.
- **Zastosuj czcionkę do wszystkich** (tylko w Tablicach kontekstowych) – pozwala ustawić taką samą czcionkę na wszystkich przyciskach tablicy.

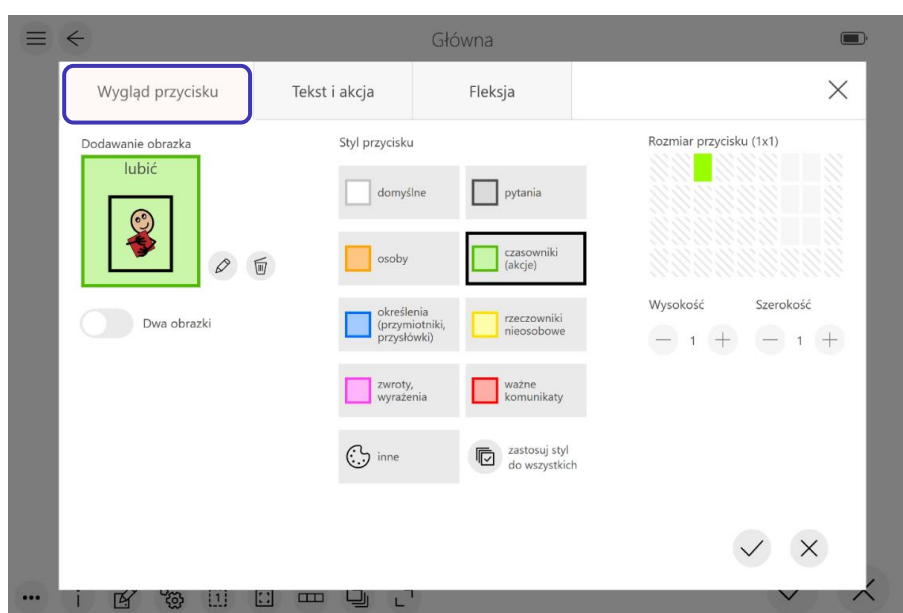


### Wygląd przycisku:


- **Obrazek przycisku** – możliwość dodania jednego lub dwóch obrazków przycisku (po zaznaczeniu opcji poniżej podglądu opcji **Dwa obrazki**).
- **Styl przycisku** – możliwość ustawienia koloru ramki i tła przycisku oraz zastosowanie ustawień do wszystkich przycisków na tablicy.
- **Rozmiar przycisku** – zmiana rozmiaru przycisku odbywa się przyciskami do ustalania wysokości i szerokości ( - oraz + ). Zaznaczone na zielono komórki odzwierciedlają wybrany rozmiar przycisku. Powiększenie przycisku jest możliwe o ile na planszy wokół przycisku znajdują się wolne pola (przyciski).



## Tekst i akcja:

- **Dodaj do paska mowy** – przy włączonej opcji przycisk po wybraniu będzie pojawiać się w pasku mowy.
- **Nawigacja m-y tablicami** – pozwala po wybraniu przycisku: wracać do poprzedniej planszy, przechodzić do klawiatur lub przechodzić do innej, wybranej tablicy.
- **Tekst wyświetlany** – pole na wpisanie tekstu, który ma się wyświetlać na przycisku.
- **Akcja po zaznaczeniu** – po zaznaczeniu przycisku możliwe jest przeczytanie tekstu lub odtworzenie pliku audio. Można też odznaczyć akcję po zaznaczeniu. Pole na czytany tekst pozwala odczytywać inny tekst niż ten wyświetlany na przycisku.
- **Ukryj przycisk** – pozwala całkowicie ukrywać przycisk na tablicy.
- **Widoczność przycisku** (tylko w Książce komunikacyjnej) – przyciskom można nadać jeden z 3 poziomów widoczności. Opcja pozwala na stopniowe wprowadzanie słownictwa na tablicy (od poziomu pierwszego), poprzez odsłanianie kolejnych przycisków. Widoczność zmieniamy klikając ikonę **(25)** w menu dolnym.
- **Ustawienia czcionki** (tylko w Tablicach kontekstowych) – ustawienia pozwalają określić rozmiar, styl (pogrubienie, kursywa) oraz kolor czcionki na przyciskach.

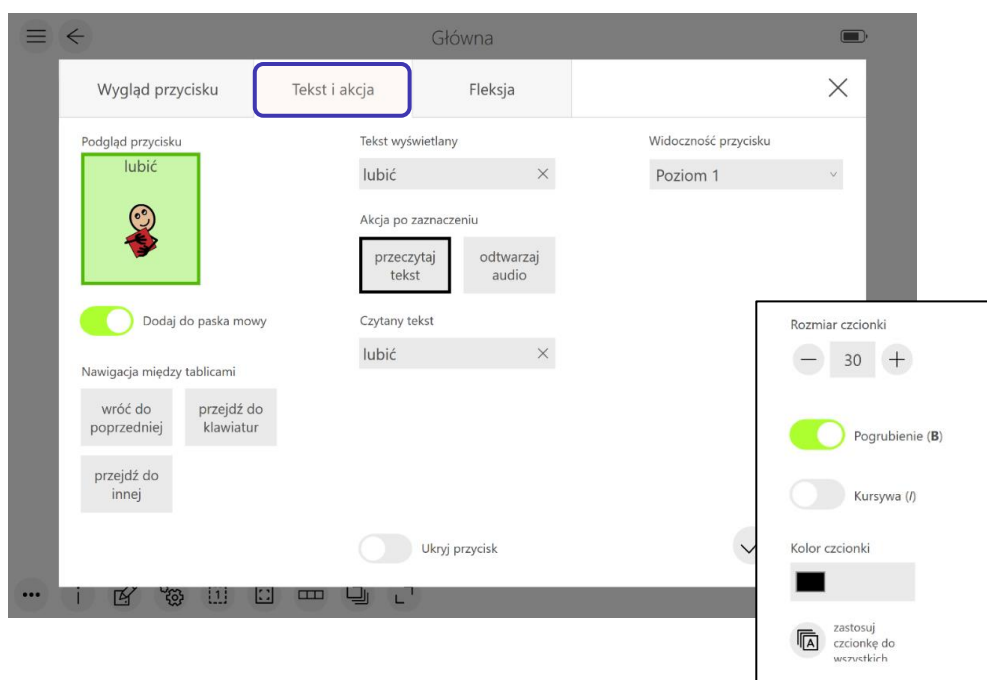

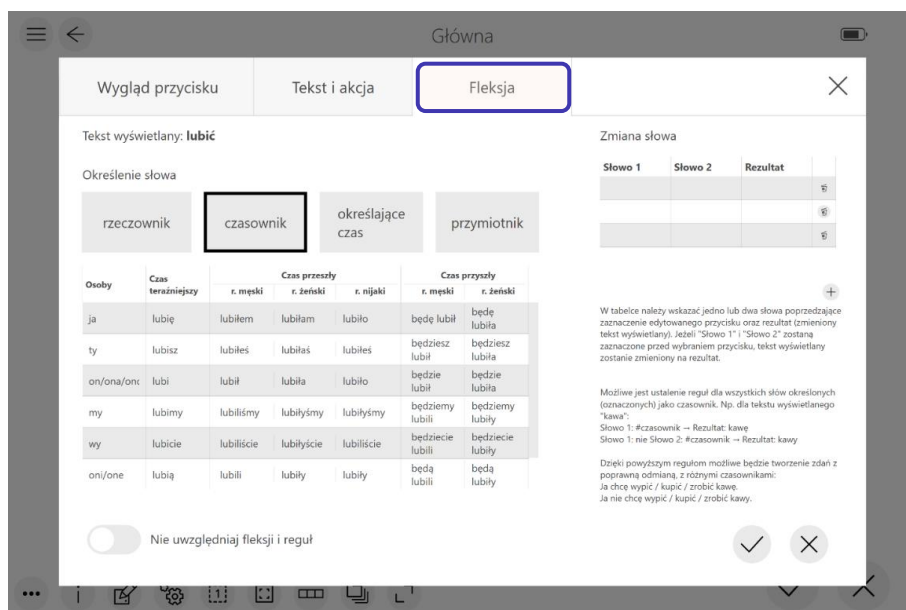

### Fleksja (tylko w Książce komunikacyjnej):

- **Określenie słowa** – określenie słowa (rzeczownik, czasownik, określenie czasu, przymiotnik) pozwala na jego właściwą odmianę oraz na odmianę słów następujących po nim. Np. wybierając kolejno trzy przyciski ze słowami „róża”, „być”, „ładny” możliwe będzie utworzenie zwrotu „**róża jest ładna**”, o ile słowa zostaną poprawnie określone jako rzeczownik, czasownik i przymiotnik.
- **Zmiana słowa** – umożliwi tworzenie dodatkowych reguł uruchamianych po wybraniu jednego lub dwóch przycisków poprzedzających. Np. edytując przycisk „dom” można dodać regułę: po słowie „do” zmieniaj „dom” na „domu”. Wystarczy jako **słowo 1** wpisać: **do**, a jako **rezultat: domu**. Można też określić dwa słowa poprzedzające np. do przycisku „kawa” dodać regułę - **słowo 1: nie, słowo 2: mieć, rezultat: kawy**. Reguła pozwoli ułożyć zdanie „Ja nie mam kawy”.
- **Nie uwzględniaj fleksji i reguł** – opcja, która wyłącza stosowanie reguł po wybraniu danego przycisku

## 10. Warunki użytkowania produktu

### Przeciwwskazania do stosowania wyrobu

W przypadku pacjentów wykazujących nadwrażliwość na światło emitowane przez wyświetlacze monitorów komputerowych (analogiczny ekran został zastosowany w systemie NeuroTAB), praca z urządzeniem powinna odbywać się po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub lekarzem neurologiem.



### Ostrzeżenia w zakresie bezpiecznego stosowania

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję i bezwzględnie przestrzegać zamieszczonych w niej uwag dotyczących bezpiecznego użytkowania. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby korzystające z wyrobu zostały poinformowane o treści poniższej instrukcji.



- Wyrób należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji i jedynie przy użyciu oryginalnych, załączonych do opakowania lub dopuszczonych do używania przez producenta części. W przeciwnym wypadku wyrób może zostać uszkodzony, bądź też jego użytkownik może zostać poszkodowany. Wprowadzanie zmian technicznych w urządzeniu oraz niewłaściwe jego użytkowanie skutkują utratą gwarancji.

### Zalecenia dotyczące użytkowania

- Przed rozpoczęciem pracy z systemem konieczne jest zweryfikowanie poprawności jego działania.
- Zalecana jest obsługa systemu w jednorazowych rękawiczkach.
- Przed rozpoczęciem pracy z Systemem konieczne jest ustawienie optymalnych ustawień wyświetlanych treści w aplikacjach, np. dostosowanie marginesów, poziom głośności, kolor tła itp.
- System może być używany tylko przez przeszkolonych: lekarzy, terapeutów, opiekunów. Producent zaleca szkolenie przed rozpoczęciem pracy z Systemem. Producent oferuje szkolenia w zakresie obsługi systemu i jego wykorzystania w pracy z użytkownikiem.
- W sytuacji wystąpienia problemów z działaniem zaleca się ponownie uruchomić System, poprzez przycisk Zamknij w Hamburger menu lub wciśnięcie przycisku zasilania znajdującego się na górnej krawędzi obudowy urządzenia.

Jeżeli system NeuroTAB w dalszym ciągu nie będzie działał prawidłowo, skontaktuj się z producentem:

**AssisTech Sp. z o.o.**

ul. Kampinoska 10, 80-180 Gdańsk

tel. 537 446 406

[kontakt@assistech.eu](mailto:kontakt@assistech.eu)



### Parametry techniczne

- NeuroTAB: Zasilacz: wejście: 100-240 V, 50/60Hz, 1,16 A wyjście: napięcie 15 V, 2,6 A, moc 39 W.
- Pojemność baterii 47 Wh.
- Zakres temperatur użytkowania: od +5°C do +25°C.
- Zakres temperatur przechowywania i transportu: od 0°C do +40°C.
- Dopuszczalna wilgotność względna: od 15% do 90% (bez kondensacji).
- Transport w niskich temperaturach (od -10°C do 0°C) powinien być ograniczony czasowo i trwać maksymalnie do 48 godzin. Przenosząc zestaw do pomieszczenia o innej temperaturze i wilgotności, należy odczekać 30 minut przed ponownym uruchomieniem go.

### Uszkodzenia, naprawa i konserwacja

- W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy urządzenia, jego uszkodzenia lub też podejrzenia o jego uszkodzeniu należy natychmiast je wyłączyć.
- W żadnym przypadku nie należy uruchamiać uszkodzonego urządzenia. Wszelkie naprawy i konserwacje mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wytwórcę lub autoryzowany serwis.
- W przypadku samodzielnych napraw nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody.
- Producent zaleca stosowanie specjalnych płynów dezynfekcyjnych przeznaczonych do szybkiego czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym płynów na bazie etanolu. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, aby czyszcząc system nie stosować płynów bezpośrednio na powierzchnię urządzenia, ale w pierwszej kolejności na szmatkę lub na jednorazowy ręcznik papierowy dedykowany do takich zastosowań.

### Utylizacja

Wyrób zawiera części elektroniczne. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### Gwarancja

Okres gwarancji zaczyna się z dniem dostarczenia wyrobu i wynosi 24 miesiące. Z zakresu gwarancji wyłączone jest normalne, zewnętrzne zużycie powierzchni lakierowanej. W okresie gwarancji wytwórca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wszelkich wad, jakie powstały wskutek zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.



Gwarancja, jak również odpowiedzialność za szkody na osobach lub innych urządzeniach, wygasa w przypadku:











- nieprawidłowej obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- nieprawidłowych napraw dokonywanych przez nieautoryzowane osoby lub serwisy,
- używania części zamiennych innych niż oryginalne,
- uszkodzenie mechaniczne spowodowane stosowaniem wyrobu z nadmiernym obciążeniem.

#### Uwagi

- Urządzenia nie wolno modyfikować bez upoważnienia wytwórcy.
- Urządzenie zawiera baterie.
- Okres użyteczności wyrobu wynosi: 5 lat.
- Tylko lekarz, specjalista lub przeszkolony opiekun może nadzorować pracę z Systemem.
- System może być wykorzystywany wyłącznie zgodnie z zadeklarowanym przez producenta przeznaczeniem.
- Urządzenie zawiera baterie. Nie należy otwierać ani demontować baterii, ani wystawiać ich na działanie ognia lub otwartego płomienia. Nie wolno ich przekłuwać ani deformować. Baterie stanowią zagrożenie tylko w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi w sposób powodujący ich uszkodzenie lub naruszenie ich integralności.
- W przypadku dostania się elektrolitu do oczu należy płukać je wodą przez 15 minut bez pocierania i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się elektrolitu na skórę należy natychmiast przemyć to miejsce wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktować się z lekarzem.



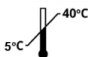

Symbol	Objaśnienia symboli
	Oznaczenie wyrobu i jego nazwa
 <small>AssisTech Sp. z o.o. ul. Kampinska 10, 80-180 Gdańsk, Poland</small>	Oznaczenie Wytwórcy – AssisTech Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
	Numer seryjny wyrobu
	Wyrób medyczny zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2017/45 oraz norm zharmonizowanych
	Część aplikacyjna typu B
	<p>Zakaz umieszczania zużytego sprzętu razem z innymi odpadami</p> <p><b>Po upływie okresu użyteczności wyrobu, jeśli wyrób jest niezdalny do dalszej pracy, nie wolno wyrzucać go do zwykłych pojemników na odpady.</b> Zużyty sprzęt należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.</p>
	Warunki przechowywania i użytkowania wyrobu w zakresie temperatur: od +5°C do +40°C
	Wyrób posiada Instrukcję Użytkownika Przed użyciem należy zapoznać się z treścią Instrukcji Użytkownika
	Wyrób do użytku w pomieszczeniach
	W instrukcji Użytkownika znajdują się ważne informacje ostrzegawcze i środki ostrożności.







**AssisTech Sp. z o.o.**

Tel. 537 446 406

kontakt@assistech.eu

[www.assistech.eu](http://www.assistech.eu)